

Télécommande d'urgence / médicale PB-201R

Cette télécommande d'urgence / médicale a été conçue pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Une pression sur son bouton envoie une alerte aux utilisateurs enregistrés.


Compatible avec les centrales Atlantic'S, elle permet d'émettre une alerte en cas d'urgence médicale ou autre.

Avec son design élaboré, cette télécommande ergonomique est particulièrement fonctionnelle.



Principales caractéristiques

- Les millions de combinaisons de la technologie *Broadcasting* permettent à chaque télécommande de bénéficier d'un codage unique qui empêche les tentatives de piratage
- La transmission de signal est indiquée par une LED clignotante
- La télécommande PB-201R est compatible avec tous les produits sans fil de la gamme Atlantic'S™ fonctionnant sur une fréquence de 433Mhz

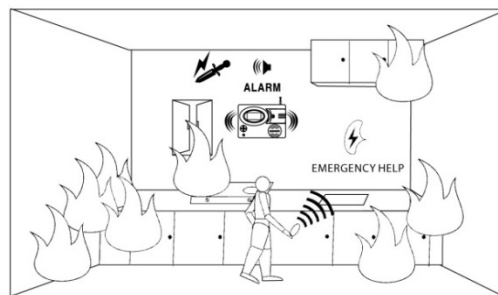

Appuyer sur le bouton rouge pour émettre un appel aux numéros enregistrés dans la centrale.

Enregistrement, test et maintenance

Enregistrement

1. Sur la centrale composer * (étoile) pendant 3 secondes ;
2. Composer ensuite 9876 # (code Administrateur par défaut) ;
3. Puis 5 # 2 # (n° de la télécommande compris entre 01 et 32) # ;
4. Appuyer sur la touche de la télécommande pour procéder à son enregistrement sur la centrale.
L'enregistrement est confirmé par un message vocal émis par la centrale ;
5. Appuyer 3 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu.

A ce stade la télécommande est correctement enregistrée, mais son type (urgence 24h/24h) n'est pas encore identifié par la centrale. Pour l'identifier, il convient d'effectuer une attribution de zone selon la procédure suivante :

1. Sur la centrale composer * (étoile) pendant 5 secondes ;
2. Composer ensuite 9876 # (code Administrateur par défaut) ;
3. Puis 6 # 1 # (suivi du même n° de zone que celui choisi ci-dessus lors de l'enregistrement) # ;
4. Composer ensuite 4 # (4 correspondant à la zone Urgence, active en permanence, même lorsque le système est désarmé) ;
5. Appuyer 3 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu.

Test de la télécommande

La télécommande PB-201R est livrée avec une pile préinstallée. Le processus de test s'effectue de la manière suivante :

1. Garder une distance minimale de 3 mètres entre la télécommande PB-201R et la centrale et appuyer durant 2 secondes sur la touche de la télécommande. La centrale doit alors émettre un appel vers les numéros enregistrés et la LED d'alarme clignote
2. Penser à tester la télécommande en différents endroits pour déterminer ses limites de portée

Remplacement des piles

Remplacer la pile dès que vous constatez un affaiblissement du signal de transmission.

1. Utiliser un petit tournevis pour dévisser les vis situées au dos de la télécommande. Garder soigneusement les vis
2. Ouvrir le cache au dos de la télécommande et enlever l'ancienne pile
3. Introduire la nouvelle pile. Faire attention à ne pas inverser les pôles
4. Revisser le cache au dos de la télécommande
5. Tester la nouvelle pile installée

Spécifications

- Portée de transmission : 50 m max. en champ libre
- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Alimentation : 1 pile 27A - 12V
- Durée de vie de la pile : 1 an environ, en utilisation standard
- Indicateur de transmission : LED
- Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°C
- Dimensions : 65 x 34 x 17.5 mm
- Poids : 20 g (avec la pile)